

口腔用一次性注射针使用说明书

- 产品名称： 口腔用一次性注射针（通用名称）
口腔用森田注射针（商品名称）
- 结构及性能： 本产品由针管，针基，容器和针套组成。为一次性产品，为了防止感染和针头折断，禁止重复使用。
- 适用范围： 本产品是口腔科中用来进行局部麻醉和传导阻滞麻醉，并已经进行了灭菌的口腔科用一次性注射针头。
- 型号规格： 25G;27G;30G
- 使用方法： 撕掉封条，捏住针基拧到专用注射器上，然后抽取药水进行注射。再往注射器上安装时，夹头处的橡胶片有可能部分凋落而阻塞针孔，因此在正式注射前，应试射确认针头是否畅通无阻。
- 保质期： 自生产之日起保质期五年。生产批号和有效期印在包装盒上。
- 贮存方法： 置于阴凉干燥处常温储存
- 注意事项：
1.本产品为一次性产品，已灭菌，禁止重复使用。
2.不要将针头弯曲后使用。
3.请在注射之前将注射针安装在注射器上。
4.防止刺伤事故，取下盖套时须小心谨慎。
5.包装盒破损或封条破损时禁止使用。
6.禁止长时间与麻药接触或装上麻药后长时间搁置，以免针头被腐蚀。
7.如发现针尖有卷曲，应立即停止使用。
8.针是装在针套里的，不可和外届直接接触。

